

**D HINWEISE ZUR ANWENDUNG UND
HANDHABUNG VON KLARSICHTBEUTELN
UND SCHLÄUCHEN BEUTELAUFDRUCK**

1. ANWENDUNGSHINWEISE

Klarsichtbeutel und
- schläuche STERIPAPER / STERINW dienen als
Verpackung für medizinische Produkte, die dampf –
oder gassterilisiert werden sollen.

Versiegeln Sie das offene Ende mit einem Durchlauf
- oder Impulssiegelgerät bei der empfohlenen
Temperatur (170-185 °C).
- bitte beim Hersteller des Siegelgerätes erfragen.

**2. EXTERNE INDIKATOREN VON
PROZESSDRUCKPRODUKT**

EO gas: gelb/braun sterilisiert
Dampf: braun sterilisiert

Die Verpackung darf nur einmal benutzt werden.
Keine beschädigte Packung verwenden.

Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall mit
dem Gerät dem Hersteller und der zuständigen
Behörde.

3. LAGERBEDINGUNGEN

Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und zu
große Hitze.

Empfohlen werden folgende Werte. Wir
empfehlen:

- Temperature 10-30 °C vor Gebrauch.
- Luftfeuchtigkeit 30-60 % vor Gebrauch.

Die Transportkartons sollten bei Transport und
Lagerung nicht beschädigt werden.

EN 868-5 ISO 11607-1



STERIFIT S.r.l.

Via dei Martini, 3
20146 Milano - Italia
info@sterifit.com – www.sterifit.com