




<p><b>E</b>      <b>INSTRUCCIONES PARA USO</b> <b>BOLSAS STERINW</b></p> <p><b>1. INSTRUCCIONES DE USO</b> Utilice las bolsas y las bobinas STERIPAPER / STERINW para empaquetar productos medicos para la esterilización vapor o gas EO.</p> <p>Cerrar la parte abierta con un maquina selladora a impulsión o rotativa a temperatura recomendada (170-185 °C).</p>	<p><b>2. INDICADORES EXTERNOS DEL PROCESO</b> <b>PRODUCTO IMPRESO</b></p> <p>EO gas: amarillo/marrón esterilizado Vapor: marrón esterilizado</p> <p>El envase solo se utiliza una vez. No usar si el envase esta deteriorado.</p> <p>Notificar cualquier incidente grave que afecte al dispositivo al fabricante y a la autoridad competente.</p>	<p><b>3. CONDICIONES DE ALMACENAR</b> Guardar protegido de la luz y del calor a una temperature ambiente. Nosotros recomendamos: - Entre 10-30 °C antes de usar. - Humedad relativa: 30-60 % antes de usar. Las cajas no deben ser dañadas al manipular o al almacenar.</p> <p><b>EN 868-5    ISO 11607-1</b></p> <p>  </p> <p><b>STERIFIT S.r.l.</b> Via dei Martinitt, 3 20146 Milano - Italia info@sterifit.com – www.sterifit.com</p>
--	---	--