



<p>D HINWEISE ZUR ANWENDUNG UND HANDHABUNG VON KLARSICHTBEUTELN UND SCHLÄUCHEN BEUTELAUFDRUCK</p> <p>1. ANWENDUNGSHINWEISE Klarsichtbeutel und - schläuche STERIPAPER dienen als Verpackung für medizinische Produkte, die dampf – oder gassterilisiert werden sollen.</p> <p>Versiegeln Sie das offene Ende mit einem Durchlauf- oder Impulssiegelgerät bei der empfohlenen Temperatur (150-180 °C). - bitte beim Hersteller des Siegelgerätes erfragen.</p>	<p>2. EXTERNE INDIKATOREN VON PROZESSDRUCKPRODUKT</p> <p>EO gas: gelb/braun sterilisiert Dampf: braun sterilisiert</p> <p>Die Verpackung darf nur einmal benutzt werden. Keine beschädigte Packung verwenden.</p> <p>Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall mit dem Gerät dem Hersteller und der zuständigen Behörde.</p>	<p>3. LAGERBEDINGUNGEN Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und zu große Hitze. Empfohlen werden folgende Werte. Wir empfehlen: - Temperature 10-30 °C vor Gebrauch. - Luftfeuchtigkeit 30-60 % vor Gebrauch. Die Transportkartons sollten bei Transport und Lagerung nicht beschädigt werden.</p> <p>EN 868-5 ISO 11607-1</p> <p></p> <p>STERIFIT S.r.l. Via dei Martini, 3 20146 Milano - Italia info@sterifit.com – www.sterifit.com</p>
--	--	---

<p>D HINWEISE ZUR ANWENDUNG UND HANDHABUNG VON KLARSICHTBEUTELN SELBSTKLEBENDE BEUTEL</p> <p>1. ANWENDUNGSHINWEISE Selbstklebende Beutel STERIPAPER dienen als Verpackung für medizinische Produkte, die dampf – oder gassterilisiert werden sollen.</p> <p>Gebrauchsanweisung - Öffnen Sie den Beutel; - Stecken Sie den Gegenstand in den Beutel; - Entfernen Sie den Schutzfilm von der Siegelkante; - Schließen Sie die Lasche und drücken Sie sie kräftig von innen nach außen fest, um so einen guten Verschluss zwischen dem Klebestreifen, dem Papier und der Folie zu erhalten.</p>	<p>2. EXTERNE INDIKATOREN VON PROZESSDRUCKPRODUKT</p> <p>EO gas: gelb/braun sterilisiert Dampf: braun sterilisiert</p> <p>Die Verpackung darf nur einmal benutzt werden. Keine beschädigte Packung verwenden.</p> <p>Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall mit dem Gerät dem Hersteller und der zuständigen Behörde.</p>	<p>3. LAGERBEDINGUNGEN Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und zu große Hitze. Empfohlen werden folgende Werte. Wir empfehlen: - Temperature 10-30 °C vor Gebrauch. - Luftfeuchtigkeit 30-60 % vor Gebrauch. Die Transportkartons sollten bei Transport und Lagerung nicht beschädigt werden.</p> <p>EN 868-5 ISO 11607-1</p> <p></p> <p>STERIFIT S.r.l. Via dei Martini, 3 20146 Milano - Italia info@sterifit.com – www.sterifit.com</p>
--	--	---