

D HINWEISE ZUR ANWENDUNG UND HANDHABUNG VON KLARSICHTBEUTELN UND SCHLÄUCHEN BEUTELAUFDRUCK

1. ANWENDUNGSHINWEISE

Klarsichtbeutel und
- schläuche VERISTERIL dienen als Verpackung für medizinische Produkte, die dampf – oder gassterilisiert werden sollen.
Umschläge und Rollen VERISTERIL mit 3 ANZ. kann auch durch Formaldehyd sterilisiert werden.

Versiegeln Sie das offene End mit einem Durchlauf - oder Impulssiegelgerät bei der empfohlenen Temperatur (150-180 °C).
- bitte beim Hersteller des Siegelgerätes erfragen.

2. EXTERNE INDIKATOREN VON PROZESSDRUCKPRODUKT

VERISTERIL:
EO gas: gelb/braun sterilisiert
Dampf: braun sterilisiert

VERISTERIL mit 3 ANZ.:
EO gas: gelb/braun sterilisiert
Dampf: braun sterilisiert
Formaldehyd: green sterilisiert

Die Verpackung darf nur einmal benutzt werden.
Keine beschädigte packung verwenden.

Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall mit dem Gerät dem Hersteller und der zuständigen Behörde.

3. LAGERBEDINGUNGEN

Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und zu große Hitze.

Empfohlen werden folgende Werte. Wir empfehlen:

- Temperature 10-30 °C vor Gebrauch.
- Luftfeuchtigkeit 30-60 % vor Gebrauch.

Die Transportkartons sollten bei Transport und Lagerung nicht beschädigt werden.

EN 868-5 ISO 11607-1



STERIFIT S.r.l.

Via dei Martinit, 3
20146 Milano - Italia
info@sterifit.com – www.sterifit.com